



Beste VisiQuick gebruiker,

Vandaag hebben wij een nieuwe release van VisiQuick, versie 4.11 vrijgegeven. Via dit schrijven willen wij u graag informeren over de mogelijkheden in deze nieuwe versie.

Inhoud

Vooraf	2
Belangrijkste wijzigingen	2
Nieuwe koppelingen met praktijksoftware.....	2
Second Opinion: bevindingen afwijzen en instellingen bewaren.....	3
3Shape Unite: Importeer uw 3Shape beelden in VisiQuick.....	3
Wat heeft u hiervoor nodig?.....	3
Hoe stelt u dit in VisiQuick?	4
Hoe gebruikt u dit vanuit VisiQuick?	4
Instelbare viewer voor Shining 3D, 3Shape en Owandy IOS.....	4
NeoWise: koppeling voor acquisitie en CT view.	5
2D acquisitie via NeoWise	5
Owandy IOS: koppeling.....	6
Konekta koppeling	6
Overige wijzigingen.....	6
Conversies: DTX-conversie nu mogelijk!	6
Update verwerken:	7
Wie kan deze update verwerken?	7
Hoe kunt u VisiQuick updaten?	7
Updaten van overige VisiQuick onderdelen	7
Bekende problemen	8



Vooraf

VisiQuick wordt ondersteund tot 2 versies terug. Met het uitbrengen van versie 4.11, wordt de laagst ondersteunde versie dus 4.9.


Indien u nu met een VisiQuick versie lager dan 4.7 werkt, is het van het grootste belang dat alle VisiQuick installaties en een eventueel replicatie client allemaal tegelijk geupdate worden naar VisiQuick versie 4.11. Reden hiervoor is dat er vanaf versie 4.7. een wijziging in de database heeft plaats gevonden.

U kunt dus niet met versie lager dan 4.7 en een nieuwe VisiQuick versie door elkaar werken!

De genoemde replicatie client wordt gebruikt op om meerdere database met elkaar te synchroniseren. Twijfelt u of u replicatie gebruikt, controleer dit dan via menu Help – Licentie.

De update procedure dient bij gebruik van Replicatie in de volgende volgorde voltooid te worden:

- 1) Alle replicatie server service installaties updaten
- 2) De replicatie client installatie updaten
- 3) Alle VisiQuick installaties die gebruik maken van een van de te repliceren of te ontvangen databases updaten. (in geval van meerdere locaties, dus op ALLE locaties).

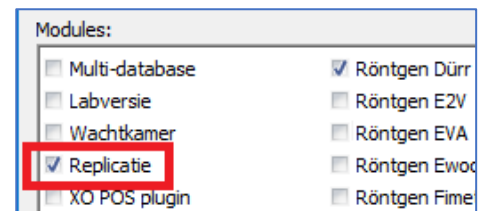

Belangrijkste wijzigingen

Nieuwe koppelingen met praktijksoftware

Eén van de belangrijkste waarden van VisiQuick is de vrijheid van keuze voor al onze gebruikers. Niet alleen op het gebied van röntgenapparatuur, maar ook op het gebied van praktijksoftware. Samenwerking is voor ons het uitgangspunt. Daardoor kunnen we de volgende nieuwe en vernieuwde koppelingen met praktijk software toevoegen aan de mogelijkheden:

- Ivory praktijksoftware:
<https://www.ivalory.nl>
- Evo Dental :
<https://www.evo-dental.nl/>
- DentaSoft praktijksoftware (vernieuwd):
<https://www.dentasoft.nl/>
- Crossuite praktijksoftware:
https://www.crossuite.com/nl_nl/
- Odontium voor de Mondzorg: (vernieuwd)
<https://odontium.nl>
- D1 praktijksoftware (Duitsland):
<https://d1denis.de/>



Voor nieuwe initiatieven die willen linken met VisiQuick is de koppelingsinformatie op aanvraag beschikbaar.




Second Opinion: bevindingen afwijzen en instellingen bewaren.

Op veler verzoek worden de instellingen van de Second Opinion toolbar voortaan per werkplek/user opgeslagen. Uw laatste instellingen voor welke annotaties en bijv. metingen u wilt zien, worden onthouden.

Tevens is de koppeling uitgebreid met de mogelijkheid om bevindingen waar u het niet mee eens bent te verbergen en dit terug te rapporteren aan Second Opinion.

Wanneer de toolbar openstaat en u houdt uw muis op een annotaties, dan ziet u een tooltip met informatie over de annotatie. Hier ziet u nu ook een oog icoon. Als u hier op klikt, wordt de annotatie verborgen.

Wilt u de verborgen annotaties weer zien, dan zet u in de toolbar het vinkje "Toon verwijderde annotaties" aan. Wilt u het verbergen van de annotatie helemaal terug draaien, dan klikt u via de tooltip weer op het oog icoon.

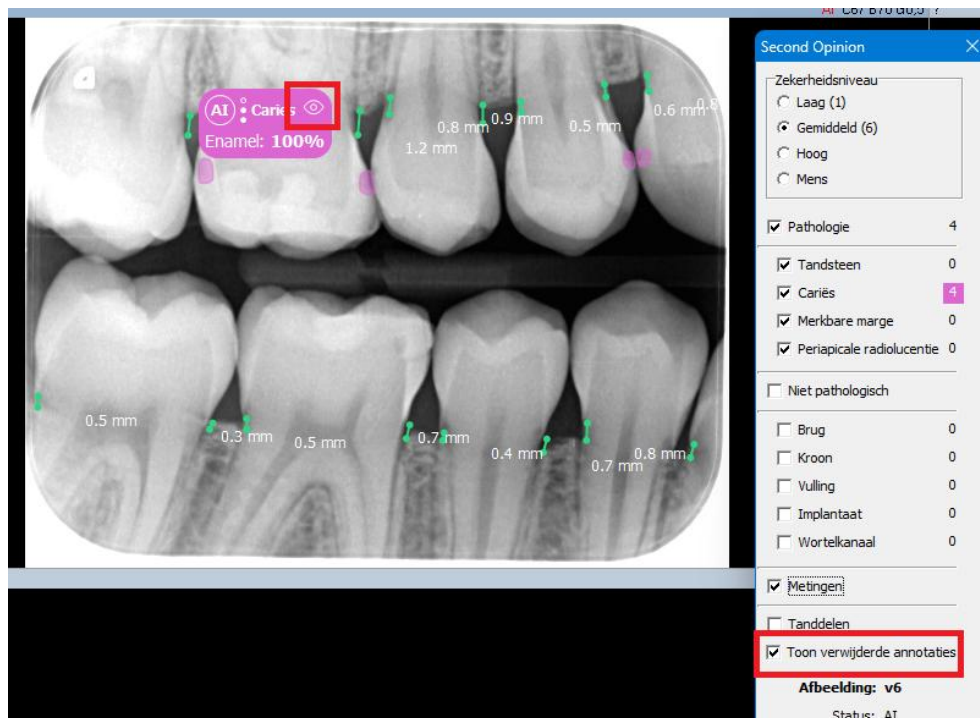

o Pearl

3shape

3Shape Unite: Importeer uw 3Shape beelden in VisiQuick

Met de nieuwe 3Shape Webservice koppeling, kunt u niet alleen vanuit VisiQuick cases aanmaken in uw 3Shape Unite software, maar ook uw 3Shape beelden terughalen naar VisiQuick.

Vanuit VisiQuick kunt u de beelden vervolgens op al uw werkplekken bekijken met een freeware 3d Viewer zonder dat de 3Shape software zelf op die pc aanwezig hoeft te zijn.

Wat heeft u hiervoor nodig?

1. 3Shape Unite Software op één van uw PC's.
2. De hostname van uw 3Shape pc: In 3Shape Unite onder More – Settings – 3Shape WebService Interface.



3. Een OAuth 2.0 Client ID. Te verkrijgen bij 3Shape.

Hoe stelt u dit in VisiQuick?

Binnen VisiQuick gaat u naar menu Extra – Externe programma instellingen.

In tabblad Speciale programma's vinkt u "3Shape Webservice-koppeling activeren" aan.

U klikt op [Configuratie]

Bij Client ID vult u de OAuth 2.0 Client ID in die u bij 3Shape heeft opgevraagd.

Bij Base URL staat default "localhost" oftewel de lokale computer als de locatie van de 3Shape Unite software. In plaats van "localhost" voert u hier de naam of het ip adres in van de computer waarbij u 3Shape Unite geïnstalleerd is.

Vervolgens gaat u in VisiQuick naar de CT knop en kiest daar als programma "3Shape".

U klikt op Instellingen – Configuratie en vinkt "Ingeschakeld" aan.

Wilt u de 3Shape beelden maar op 1 pc onder de CT knop zien, dan kiest u onder Instellingen eerste voor "Lokaal opgeslagen" zodat de koppeling alleen op deze pc geactiveerd wordt.

Vinkt u dit niet aan, dan geldt de instelling voor het hele netwerk.


Hoe gebruikt u dit vanuit VisiQuick?

Onder menu Extra heeft u nu de opties "3Shape Unite Open patient" om 3Shape Unite met de geselecteerde patiënt te openen. U dient altijd van tevoren 3Shape Unite op te starten en in te loggen met uw pin code.

De optie "Import from 3Shape Unite" kunt u gebruiken om media van de geselecteerde patiënt vanuit 3Shape Unite in VisiQuick te importeren.

Deze beelden worden in VisiQuick toegevoegd onder de CT knop.

Hier kunt u ze openen met een externe viewer. Meer over het gebruik van een externe (freeware) viewer, leest u hieronder.

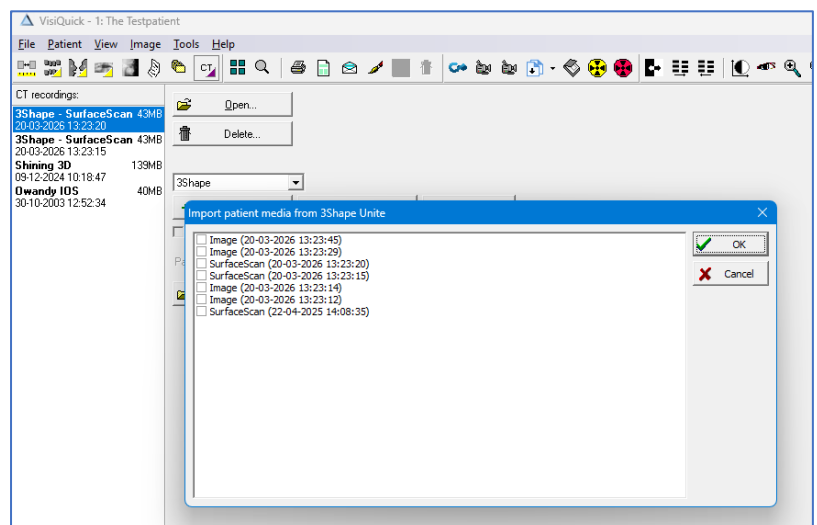

Instelbare viewer voor Shining 3D, 3Shape en Owandy IOs

Wanneer u 3D modellen in VisiQuick heeft opgeslagen heeft u een externe viewer nodig om de beelden te kunnen bekijken.

Wanneer u in de CT module een opgeslagen Shining3d, 3Shape of Owandy IOS project selecteert en op [Open] klikt, zal VisiQuick in eerste instantie kijken wat de default Windows viewer voor dit bestands type is. Is deze niet ingesteld, dan zal er een vraagstelling komen welk programma u wilt gebruiken voor het bekijken van de beelden.



Wilt u voor een bepaald bestandstype specifiek afwijken van de Windows Defaults wanneer u dit bestandstype vanuit VisiQuick opent, dan kunt u dit instellen in menu Extra- Externe Programma instellingen – Bestandskoppelingen.

Free ware viewer die u hier eventueel voor kunt gebruiken zijn:

3D slicer: <https://www.slicer.org/>


BlueSkyPlan: : <https://www.blueskyplan.com/>

Implastation: <https://implastation.com/>

NeoWise: koppeling voor acquisitie en CT view.

VisiQuick is uitgebreid met een koppeling met NeoWise voor alle New Tom, My Ray, Castellini NeoWise devices. Aquisitie kan gedaan worden via NeoWise en de CT beelden worden direct uit de NeoWise database gelezen en in de imagelist in de VisiQuick CT module getoond

Binnen VisiQuick is voor gebruik van NeoWise een NewTom licentie nodig. U kunt dit controleren onder Help – Licentie en anders kosteloos deze licentie uitbreiding bij ons aanvragen.

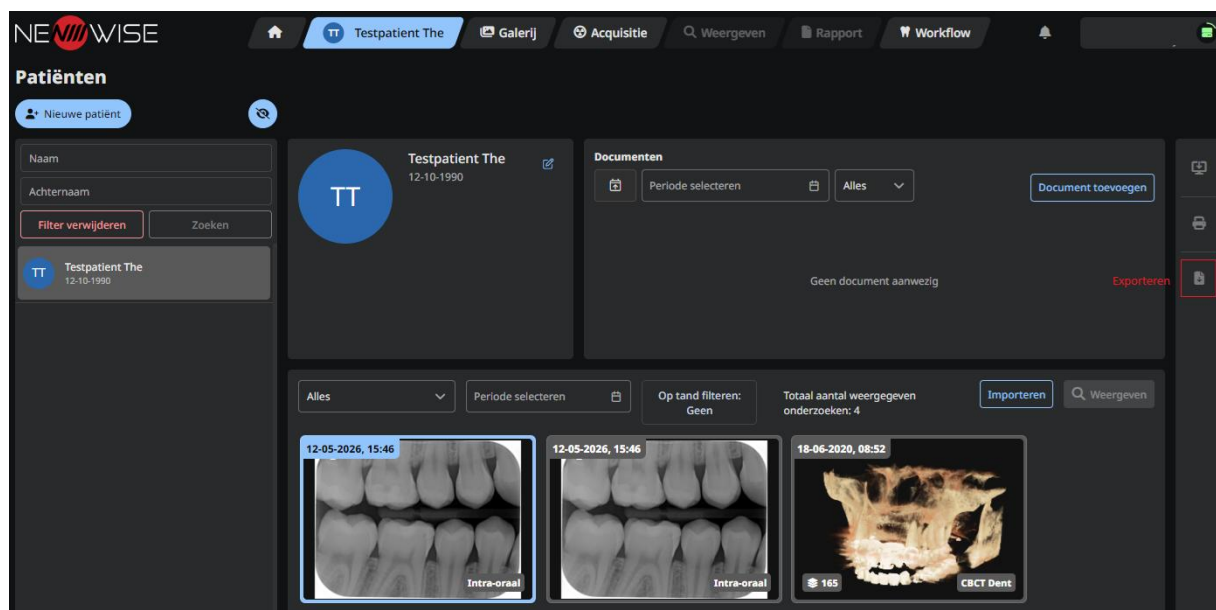

2D acquisitie via NeoWise



In de acquisitie module binnen VisiQuick kan ook een export map voor 2D beelden worden opgegeven. 2D beelden die vanuit Neowise naar deze map worden geëxporteerd, worden in het opname venster van VisiQuick geïmporteerd na acquisitie.

De workflow is hierbij:

- Start 2D acquisitie in VisiQuick
- Maak/ importeer 2D opname in Neowise
- Exporteer de opname via de [Patienten] tab in NeoWise naar de eerder in VisiQuick gedefinieerde export map
- De opname verschijnt in het VisiQuick acquisitie scherm.
- U kunt de opname in VisiQuick opslaan.



Owandy IOS: koppeling

In menu Extra – Externe programma instellingen, tabblad Speciale programma's kan nu ook een link met Owandy IOS geactiveerd worden. Onder menu Extra krijgt u dan de optie "Owandy IOS New case". Ook is er in de CT module een optie voor Owandy IOS toegevoegd.

Wanneer u deze Owandy CT module activeert worden beelden in Owandy IOS direct uitgelezen en in de imagelist in de VisiQuick CT module geïmporteerd.

De Instellingen voor de Owandy CT module activeert u enkel op werkplekken waar Owandy IOS geïnstalleerd is. Door "Lokaal opgeslagen" aan te vinken, gelden de gemaakte instellingen alleen voor de huidige werkplek. Vinkt u dit niet aan, dan gelden deze instellingen voor alle werkplekken.

De in de CT module geïmporteerde Owandy IOS 3D modellen kunt u vanuit de CT module openen met een externe viewer.

Meer over het gebruik van een externe (freeware) viewer, leest u in [Instelbare viewer voor Shining 3D, 3Shape en Owandy IOS](#)



Konekta koppeling

Konekta van Boneprox is een digitale platform waarop verschillende diensten voor de mondzorg praktijk aangeboden worden. U kunt er bijvoorbeeld doorverwijzingen naar de bij Konekta aangesloten specialisten sturen, communiceren met andere klinieken of gebruikmaken van oplossingen om de dagelijkse gang van zaken in de kliniek te stroomlijnen.

Via de nieuwe Konekta koppeling is het nu mogelijk beelden vanuit VisiQuick direct door te sturen naar Konekta.

Konekta is in Scandinavië al een bekende naam, maar is ook beschikbaar in Nederland, waar zij nog minder bekend zijn. Voor meer informatie verwijzen we u naar <https://www.konekta.clinic/en>

Overige wijzigingen

- Bij het meesturen van patiëntgegevens op geëxporteerde foto's werd de eventueel ingestelde eigen lay-out voor de patiëntgegevens genegeerd. (altijd werd default lay-out gebruikt).
- Foutmelding "syntaxis error" bij het openen van een opname via EZ3D-i is opgelost.
- Nynorsk is nu ook als taal in VisiQuick beschikbaar.
- In de Generic Vatech aansturing wordt nu ook Auto Pano ondersteund.

Conversies: DTX-conversie nu mogelijk!

Vanaf dit jaar hebben we ons uitgebreide aanbod aan beeldconversiemogelijkheden uitgebreid, zodat nu ook beelden uit de Dexis DTX Studio-software en Cliniview-systemen die gebruikmaken van DTXcore, kunnen worden geconverteerd naar VisiQuick.



Update verwerken:

Wie kan deze update verwerken?

Deze update kan verwerkt worden door iedereen met een VisiQuick 4.7 versie of hoger heeft en een geldig abonnement.

Uw VisiQuick versie vindt u rechtsonder in het VisiQuick scherm. Begint dit met een 4, maar een lagere versie dan 4.7, lees dan eerst de waarschuwing bij "[Vooraf](#)".

Is uw versie lager dan 4, neemt u dan contact met ons op.

Hoe kunt u VisiQuick updaten?

Het updaten van VisiQuick gaat zeer eenvoudig en duurt ongeveer 5 minuten per werkplek. Uw huidige instellingen blijven bij het updaten gewoon bewaard.

Op onze website vindt u een korte [instructie video](#) hoe het updaten werkt of lees de instructies hieronder. Laat u de update liever door uw eigen ICT partij uitvoeren, stuurt u deze mail naar hen door.

De update zelf vindt u ook op onze website onder de Downloads: [Ga naar update downloaden](#)

1. Zoek de gedownloadde Setup op in uw downloads folder.
2. Klik met rechts aan, Eigenschappen, Deblokkeer.

NB. Deblokkeer altijd de gedownloadde zipfile via rechtsklik Eigenschappen, Deblokkeer voordat u deze uitpakt en de update verwerkt!

3. Klik de zip met rechts aan en kies voor Alles uitpakken.
4. U kunt deze eventueel ook gelijk uitpakken naar de centrale Setup map in uw VisiShare. Hij is dan vanaf alle werkplekken bereikbaar.
5. Open de uitgepakte map.
6. Sluit VisiQuick op deze werkplek
7. Start VisiQuick Setup.
8. Indien er geconstateerd wordt dat de VisiQuick folder niet leeg is, wordt er om bevestiging gevraagd om deze map te gebruiken.
9. Maak u geen zorgen de configuratie instellingen van uw pakket worden hierbij wel behouden. Als de geïnstalleerde VisiQuick versie erg verouderd is wordt u om bevestiging gevraagd om de oude versie te verwijderen. Ook hierbij blijven de instellingen wel behouden.
10. Klik hier op [Yes] om verder te gaan met de update.
11. De gedeelde folder wordt aangegeven, klik op [Next >] om door te gaan.
12. Nogmaals [Next >], [Install].

NB. VisiQuick hoeft niet op alle werkplekken uit te staan tijdens het installeren, maar wij adviseren wel bij het updaten van VisiQuick alle werkplekken hierin mee te nemen.

Updaten van overige VisiQuick onderdelen

Denk bij het updaten van VisiQuick ook aan eventueel geïnstalleerde Remote X-ray server, Replicatie server en Replicatie client installaties.

Wij raden tevens aan de koppeling tussen uw administratie systeem en VisiQuick met enige regelmaat te update. Deze vindt u in de gedownloadde setup folder `..\tools\VqLink\VqLinkSetup.exe`



Deze start u en vervolgens klikt u een aantal maal op Volgende en laat u de default instellingen staan. Afhankelijk van of uw administratie pakket een centraal geïnstalleerd applicatie is of een installatie per werkplek dient de koppeling 1 x centraal ge-update te worden of per werkplek. Bij een centraal geïnstalleerde executabel dient het administratie pakket tijdens het installeren van de koppelings-update op alle werkplekken afgesloten te zijn. Bij een patiënt administratie pakket die per werkplek een lokale executabel heeft, dient het patiënt administratie pakket enkel op de werkplek die ge-update wordt afgesloten te zijn.

Bekende problemen

Wanneer u een foutmelding krijgt m.b.t. toegang of machtiging tot het bestand wanneer u de VisiQuick Setup probeert uit te voeren, probeer het volgende:

1. Indien u de setup start vanuit een netwerk locatie, kopieer de setup dan eens naar de lokale computer en probeer het nog eens.
2. Schakel tijdelijk uw Anti virus bescherming uit en probeer het nog eens.

