

# VisiQuick Nieuwsbrief Januari 2025

Release: 4.8.0



Beste VisiQuick gebruiker,

Vandaag hebben wij een nieuwe release van VisiQuick, versie 4.8.0 vrijgegeven. Deze release bevat enkele correcties en toevoegingen op de eerdere VisiQuick versies.

Via dit schrijven willen wij u graag informeren over deze correcties en toevoegingen.

## Inhoud

Vooraf .....	1
Gebruik van replicatie en VisiQuick 4.7.X en hoger.....	1
Correcties in deze versie.....	2

## Vooraf

Indien u met een VisiQuick versie 4.6.X of lager werkt is het van het grootste belang dat alle VisiQuick installaties en een eventueel replicatie client allemaal tegelijk geüpdatet worden naar de nieuwe VisiQuick versie. **U kunt dus niet met verschillende VisiQuick versies door elkaar werken!**

Dit geldt enkel wanneer u nu een VisiQuick versie 4.6.x of lager gebruikt.

## Gebruik van replicatie en VisiQuick 4.7.X en hoger

Indien u gebruik maakt van replicatie en nu nog een VisiQuick versie 4.6.x of lager gebruikt dienen zowel alle VisiQuick installaties als de replicatie client en server naar deze versie geüpdatet te worden.

Een oudere Replicatie server in combinatie met een 4.7.X of hoger replicatie Client zal de foutmelding "Function GetDbInfo not implemented" geven en niet meer functioneren.


Dit is helaas niet te ondervangen omdat de oudere versie simpelweg nog niet op de hoogte is van het bestaan van deze nieuwe functie.

De update procedure dient in de volgende volgorde voltooid te worden:

- 1) Alle replicatie server service installaties updaten
- 2) De replicatie client installatie updaten
- 3) Alle VisiQuick installaties die gebruik maken van een van de te repliceren of te ontvangen databases updaten. (in geval van meerdere locaties, dus op ALLE locaties).

**Neem bij enige twijfel contact met uw ICT beheerder, uw VisiQuick distributeur of de VisiQuick helpdesk op!**

Twijfelt u of u replicatie gebruikt, controleer dit dan via menu Help – Licentie.

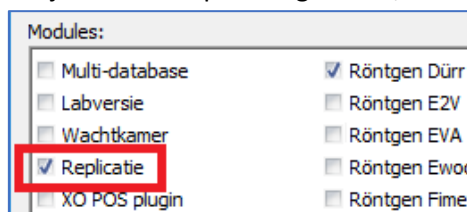

# VisiQuick Nieuwsbrief Januari 2025

Release: 4.8.0



## Correcties in deze versie

- We hebben een probleem opgelost met VistaScan in röntgen op afstand waarbij het selectievakje "Always on top" in het configuratiescherm niets deed.
- We hebben een waarschuwingsbericht toegevoegd wanneer alle beelden van de ene patiënt naar de andere worden verplaatst en er externe beelden kunnen bestaan die niet kunnen worden verplaatst.
- We hebben een probleem opgelost met de Palodex CT OnDemand module waarbij sommige instellingen niet werden opgeslagen.

## Toevoegingen in deze versie

- We hebben functionaliteit toegevoegd waarmee tekst uit de logboekvensters naar het klembord gekopieerd kan worden.
- We hebben ondersteuning toegevoegd voor de Trident Gold sensor. (Vatech - Trident Iview Gold-sensor)
- We hebben ondersteuning toegevoegd voor de CareStream 9600 (2D en 3D acquisitie via Trophy Acquisition).